

MagnoZip

“Je jas ‘floept’ met magneten vanzelf dicht”

Na een ongelukkige val moest Ria Snoek (71) ineens alles met één hand doen. En met een open jas naar buiten vond ze in de winter niet handig – zeker met haar chronische ziekte. Ze ontdekte de MagnoZip, een strip waarmee je je jas met één hand open en dicht kunt doen.

De MagnoZip bestaat uit twee magnetische strips die je over de linker- en rechterkant van je rits schuift. “Je hebt geen naald en draad nodig. Dat vond ik wel handig, zeker omdat ik ‘m tijdelijk nodig heb”, vervolgt Ria. “Je bevestigt de MagnoZip met de bijgeleverde klemmetjes. En door de magneten in beide strips ‘floept’ je jas dan dicht en heb je een naadloze, waterdichte en betrouwbare sluiting. Je hebt geen kracht of fijne motoriek nodig.”

Nieuw product

De MagnoZip is een vrij nieuw product. Het is recent ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Inholland en samen met ergotherapeuten, revalidatiecentra en het speciaal onderwijs getest. Hij is er in drie maten. En Ria is enthousiast: “Het is een goed product, hoewel de handleiding

nog wat beter zou kunnen. Ook liet de magneet onderaan mijn jas soms los, maar het mooie was dat de mensen achter het product direct met een oplossing kwamen, zelfs toen ik op zondag mailde!”

Dat het monteren moeilijker was dan ze verwacht had, rekent Ria vooral zichzelf aan. Ze lacht: “Ik had niet heel goed gelezen: je moet de klemmetjes tussen het rubber en de magneet schuiven, niet over allebei tegelijk.” Ze heeft nog wel een goede tip voor wie de MagnoZip wil uitproberen: “Je moet de afstand tot aan je sleutelbeen meten om de juiste maat te bepalen – dus niet tot aan het einde van de rits. Het bovenste deel van je jas blijft dus open, maar met een sjaal kun je er prima voor zorgen dat de kou buiten blijft.”

De rits die Ria nu heeft, is dus te lang, maar ze mag hem ruilen. En pas na een

dag of twee ‘uithangen’ is de strip écht gebruiksklaar. “Dat heeft ermee te maken dat de strips opgevouwen in een doos werden geleverd”, zegt Ria. “De vouwen zijn er na een dag of twee pas uit. En zorg ook dat de jas niet te strak zit. Want dan gaat ‘ie toch een beetje open.”

Belangrijk: Gebruik je een pacemaker, ICD of een ander gevoelig implantaat of medische apparatuur, dan kun je de MagnoZip met zijn sterke magneten niet gebruiken. «



Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Scouters. Scouters biedt toegankelijke informatie en onafhankelijk advies over innovatieve hulpmiddelen voor en door mensen die beter willen bewegen. Meer weten over het Flexobed of andere tests en adviezen lezen? Kijk op » scouters.nl

